

Сообщения дисплея. Решение проблем

	Батарея разряжена.	
	Батарея разряжена. Зарядите батарею минимально. Чтобы избежать неточности в измерениях, выньте батарею.	Замените батарею.
	Если измерение ВАТ следует немедленно заменить батареей.	Замените батарею на новую.
	Малый или недостаточный объем забранного воздуха.	Нажмите СЕТЬ, чтобы повторить измерение.
	Если в течение 30 секунд не был произведен набор пробы, то на экране появится ОУТ.	Нажмите СЕТЬ, чтобы повторить измерение.
	Рабочая температура не входит в диапазон от 0 до 40°C.	Повторите измерение в благоприятных условиях.

Технические характеристики

Индикация	0.00 до 5.00 % \pm 0.00 - 25.0 мг/л
Точность	0.02 - 0.99% \pm 0.05% при 25 °С
Время на тесту	18 секунд
Процедура анализа	10 секунд
Сенсор	Электрохимический
Дисплей	4-х разрядный экран с подсветкой
Питание	2 батарейки AAA
Вместимость батареи	Около 500 тестов на новых батарейках
Размеры	48 x 115 x 18 мм
Вес	70 г (без батареи)
Рабочая температура	0 - 40°C
Калибровка	Каждые 12 месяцев или 500 тестов

Важные заметки

- Проверку следует производить не ранее, чем через 20 минут после употребления спиртных напитков, приема пищи или курения.
- Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор может вывести прибор из строя.
- Не храните прибор вблизи от источников запахов (косметика) или нагревательных приборов.
- Для измерения используйте только качественные батарейки.
- Показания прибора не являются доказательными — независимо от количества принятого спиртного на экране появится 0,00.

Гарантия и сервис

ООО «СИМС-Э», являясь официальным представителем компании, производителем продукции, что приобретенный Вами алкотестер не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектации на момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия в течение всего срока службы изделия гарантии, но в исключительных обстоятельствах технического характера, вызванного использованием некачественного топлива. В случае отказа от гарантийного обслуживания полагается выдать отечественный аналог с обоснованием причины отказа. Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ.

ООО «СИМС-Э» как авторизованный региональный сервисный центр, для осуществления гарантийного ремонта необходимо предъявить настоящие документы с отметкой о дате продажи.

Внимание!

Время на прибор — 12 месяцев. Гарантия на сенсор — 12 месяцев (без учета тестов). Гарантия не распространяется на химическое истощение датчика.

Алкотестер поступает в продажу с заводской калибровкой, производимой на специализированном оборудовании. В процессе работы чувствительный и вентильный датчик прибора накапливает, как правило в кратчайшие сроки, загрязнения выветриваемой пробы. Для обеспечения точности необходимо время от времени проводить настройку алкотестера в специализированном сервисном центре.

Параллельно, внеочередное обслуживание возможно, в основном, от неисправности или поломки прибора. В сервисе необходимо проводить настройку через каждые 500 тестов.

Производитель:
DA Tech Co., Ltd
Woonbonghwayi Street 45,
Songhwan 2 Dong, Buiyanggu,
Incheon, Korea Tел: 409-9112

Поставщик (Импортер):
ООО «СИМС-Э»
124640, г. Москва, ул. Новослободская, д. 6,
корп. 1
Тел./Факс: (495) 799-31-90
www.alcotester.ru

Серийный номер

Дата продаж

Печать

ALCOSENT
персональный алкотестер **DA-7100**



Руководство пользователя



Внимание! Избегайте попадания дыма в отверстие для забора воздуха.


Важная информация

- Проверку следует производить не ранее, чем через 20 минут после употребления спиртных напитков, приема пищи или курения.
- Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор может вывести прибор из строя.
- Не храните прибор вблизи от источников запахов (косметика) или нагревательных приборов.
- Не рекомендуется проводить проверку под сильным ветром или в помещении с загрязненной атмосферой.
- Для сохранения точности показаний рекомендуется настраивать (заменять сенсор) приблизительно через каждые 500 тестов.
- Диета, низкокалорийная диета и некоторые другие факторы приводящие к повышению концентрации этанола в выдохе могут вызывать ложно-положительные результаты. Проконсультируйтесь с врачом.
- Срок службы датчика и точность показаний существенно уменьшаются при:
 - продувании через прибор предельных концентраций алкоголя.
 - использовании алкотестера для массовых проверок
- Алкотестер DA-7100 не предназначен для профессиональной деятельности.

Показания прибора не являются доказательными — независимо от количества принятого спиртного не следует садиться за руль. 1

Введение

Благодарим вас за приобретение нашего продукта. DA-7100 является цифровым алкотестером с улучшенным электрохимическим сенсором, который измеряет уровень алкоголя в организме по выдыхаемому воздуху и выводит показания в следующих единицах измерения: %BAC, г/л (%), мг/л.

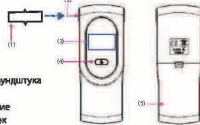

Подготовка

Вставьте 2 батарейки ААА в батарейный отсек, соблюдая полярность.



Печать даты продаж

Вставьте мундштук в отверстие сбоку. Удостоверьтесь, что мундштук полностью вставлен. Старайтесь использовать новые мундштуки для каждого тестируемого.

Вставляйте мундштук аккуратно!



Не позволяйте табачному дыму попасть в алкотестер.

Проведение измерений

Нажмите кнопку Включения (СЕТЬ). На экране отобразится количество проведенных тестов и начнется обратный отсчет. Когда отсчет дойдет до нуля, прозвучит двойной звуковой сигнал. На экран появится «7» и загорится START. Продуйте в мундштук с умеренной силой в течение 5 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал. Если забор пробы прошел успешно на экране вы увидите эту картинку. Через несколько секунд (зависит от содержания алкоголя) отобразится результат измерения. Если вы хотите повторить измерение, нажмите кнопку Включения и обратный отсчет начнется заново. Алкотестер автоматически выключится через 15-20 секунд.

Не проводите измерение в течение 20 минут после еды, употребления алкоголя или курения. 2